




繰り返し使用の場合、洗浄時に分解しているため組み立ててください。

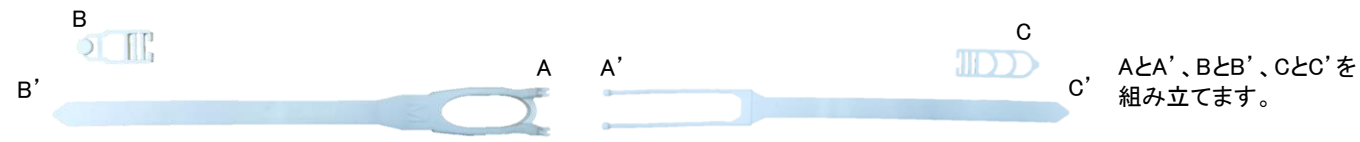

AとA'、BとB'、CとC'を
組み立てます。

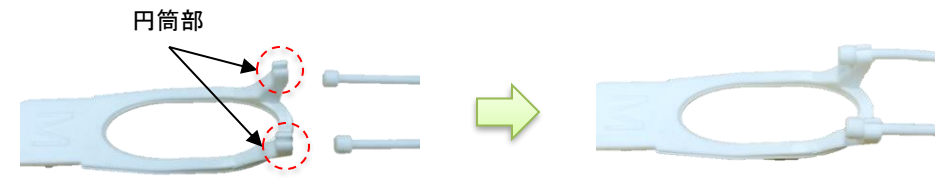

Aの円筒部へA'をはめ
込みます。
その際に、A'を少し伸
ばすようにすると、はめ
込みやすいです。

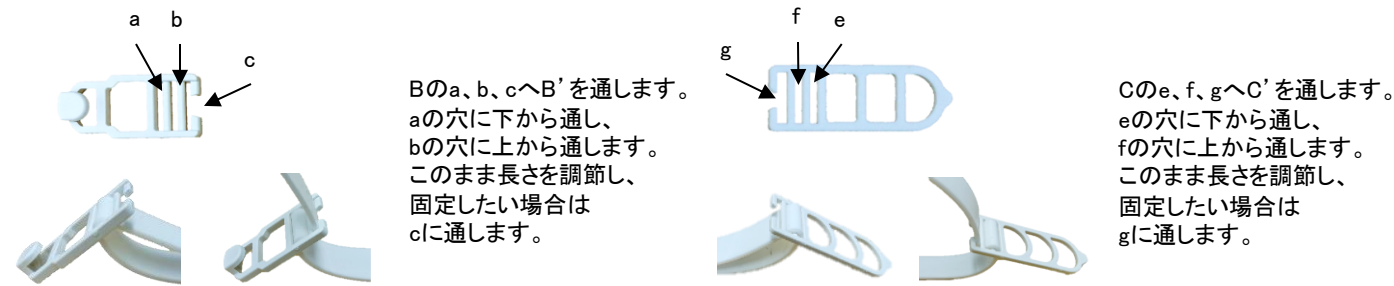

Bのa、b、cへB'を通します。
aの穴に下から通し、
bの穴に上から通します。
このまま長さを調節し、
固定したい場合は
cに通します。

Cのe、f、gへC'を通します。
eの穴に下から通し、
fの穴に上から通します。
このまま長さを調節し、
固定したい場合は
gに通します。

組立完成

保管、清掃方法に関する事項

- 1) 水濡れに注意し、高温・多湿・直射日光を避けて保管してください。
- 2) 蛍光灯・紫外線殺菌灯下やオゾンが発生する器械の周辺には保管しないでください。
- 3) 本体に衝撃が掛からないように取り扱いに注意してください。
- 4) 使用後は直ちに洗浄してください。汚れが乾燥すると落ちにくくなります。
- 5) 汚染除去に用いる洗剤は洗浄方法に適したものを選択してください。中性洗剤を推奨します。

保守に関する事項

使用前に、汚れ・亀裂・破損・可動部の動き等を点検してください。
亀裂、破損などが見つかった場合は、使用を中止して下さい。
皮膚への接触部分が固くなり、瞼の固定が困難になった場合は使用を中止してください。

有効期限：製造年月日より1年（個別袋に記載）
個装袋開封後1ヶ月

お問い合わせ先

製造販売業者
株式会社センチュリーアークス
〒113-0033 東京都港区西麻布3丁目13-1
Tel: 03-6804-5752 FAX: 03-5411-2661
<https://www.centuryarks.com>

お問い合わせ受付時間
土・日・祝日弊社休業日を除く
9:00~17:00

住所や電話番号は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

ELC000014

特願2017-090439

特願2017-159672

ソフト眼瞼固定器

ELC-FYN シリーズ

取扱説明書

はじめに

眼科の先生の「患者様の眼をもっと大事にしたい」その発想から生まれました。
現在の開瞼器の弱点を補うソフトな開瞼器です。開瞼力は手術用ほど強力ではありません。
しかし、「使用時・使用後においてストレスが少なく、使いやすいものはないのか、患者様側も安心して診察に望める器具はないのか」と言う要望を叶えるための器具です。
また、お子様にも安全にご使用いただくことができます。

使用目的又は効果

本品は眼検査時などの眼瞼を開けた状態を保持するために用います。
検査装置画像に睫毛が入るのを防ぎます。

特徴

- 軽量コンパクト設計
- 肌にやさしい素材を使用
- 着け心地の良いフィット感
- 簡単な操作性


製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下の注意事項をよくお読みください。

安全上の警告・注意

- 1) 使用目的以外に使用しないでください。
- 2) 使用前に必ずアルコールで消毒してください。
- 3) 製品に異常が認められる場合は使用しないでください。
- 4) 材質等に過敏症がある患者には使用しないでください。
- 5) 無理に引っ張らないでください。
- 6) 二次的加工はしないでください。
- 7) 浸漬、滅菌はしないでください。
- 8) 使用期限を守りご使用ください。

廃棄方法：地域、自治体の規制に従って廃棄してください。


製品の部品名称

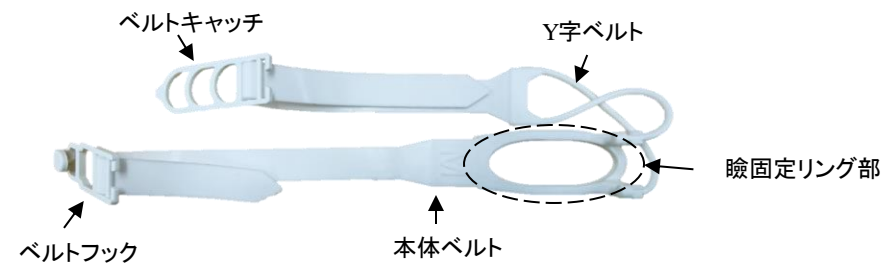

| 構成品 | 材質 | 機能 |
|---------|----------|--------------------|
| 本体ベルト | シリコンゴム | 眼瞼及び頭部を固定する |
| Y字ベルト | シリコンゴム | 本体ベルトと組合せ、頭部を固定する |
| ベルトキャッチ | ポリカーボネート | 頭部を固定し、ベルト長さの調節が可能 |
| ベルトフック | ポリカーボネート | 頭部を固定し、ベルト長さの調節が可能 |

一般的な使用方法とその注意事項

本体フレームは図1の向きになるようにして装着します。

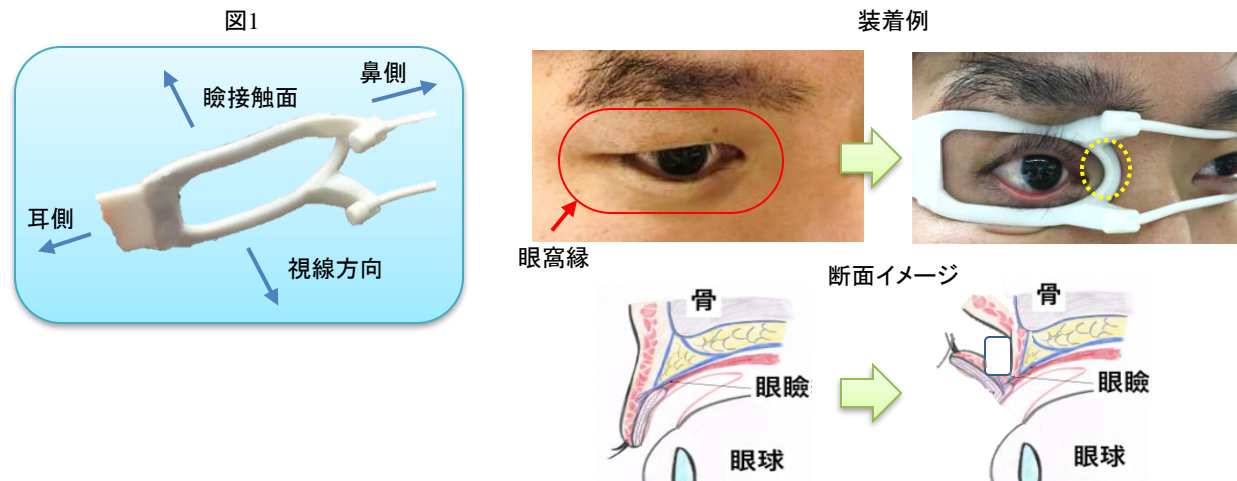

- 眼窩縁に沿って適切なサイズを選択し使用してください。
- 黄色点線の箇所を支点にし、眼窩縁に沿って本製品を装着します
- 眼に機器が入らないようにしてください




注意

- 誤った方向に装着したり、適正サイズではない場合、瞼にフィットせず、うまく開瞼することができません。(サイズはS,M,Lがあります)
- 眼接触面が瞼に完全に触れるように装着してください。
- 眼に機器が入らない様に位置を注意してください。
- 睫毛を挟まない様に注意してください。
- 非対象の眼に対しても、眼に機器が入らないように注意してください。


装着事前準備

初めに、両ベルトを再度締めることが可能な程度まで緩めておきます。すでに使用后、固定されている場合は、切り欠き部から外してください。(出荷時にはベルトが短くなっており、また固定はされていません)


あらかじめ緩めておくことで装着をスムーズにします
被検者のサイズに合わせ調整してください

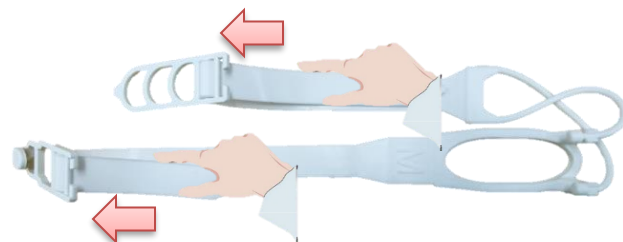

装着推奨手順

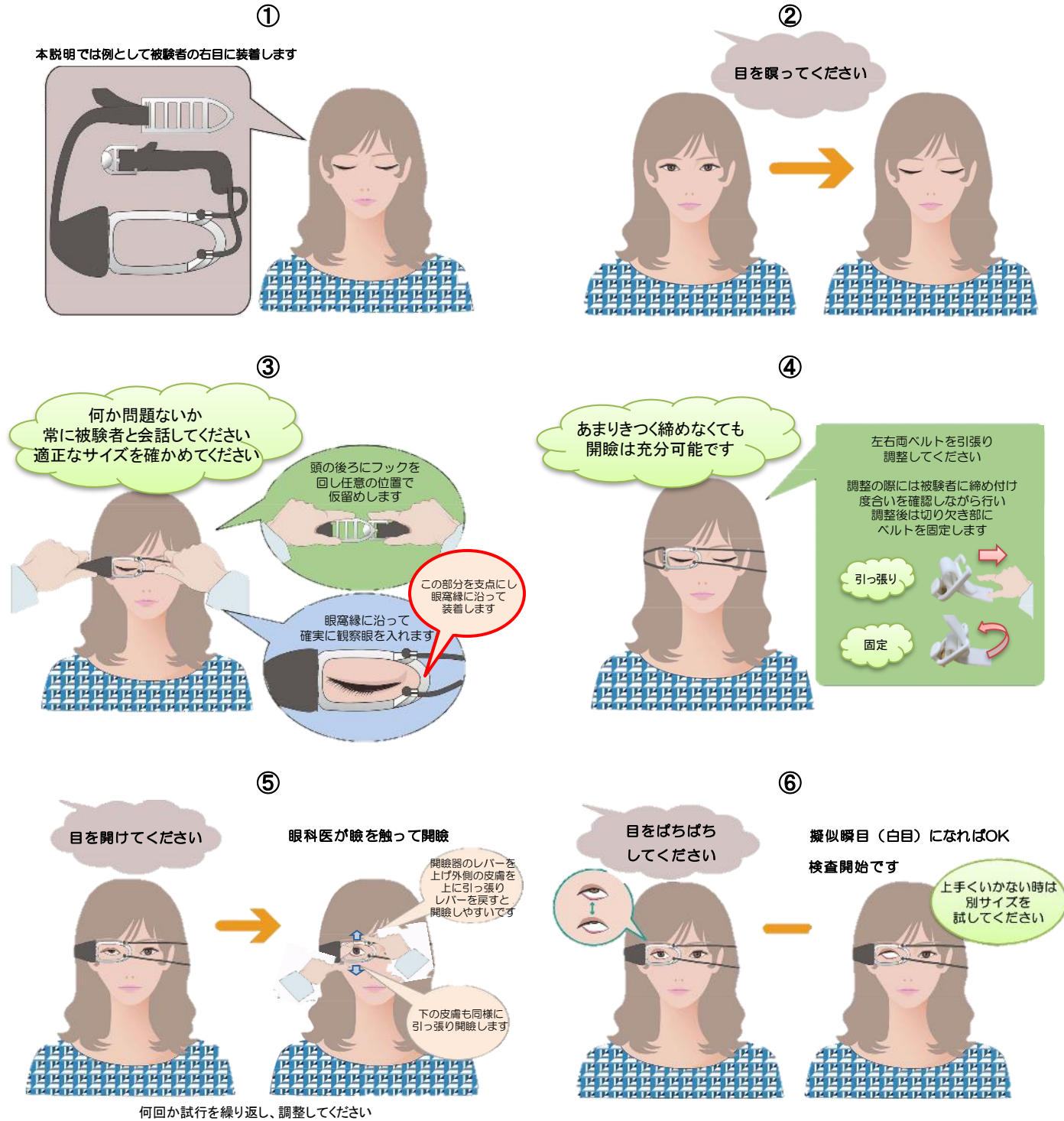

脱着推奨手順

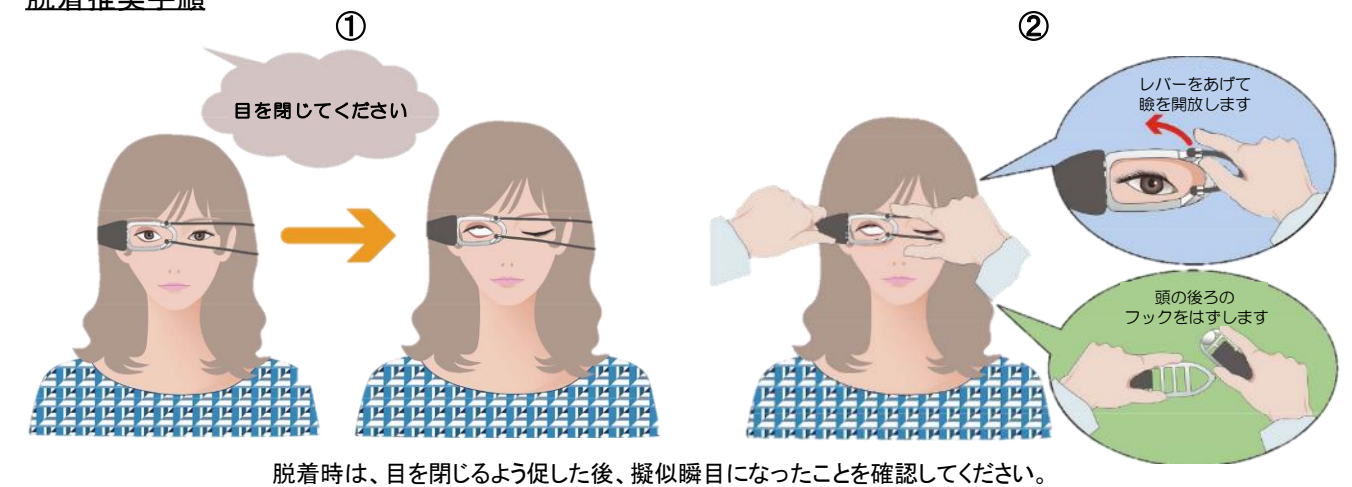

脱着時は、目を閉じるよう促した後、擬似瞬目になったことを確認してください。